


PLEROMOBIL 303

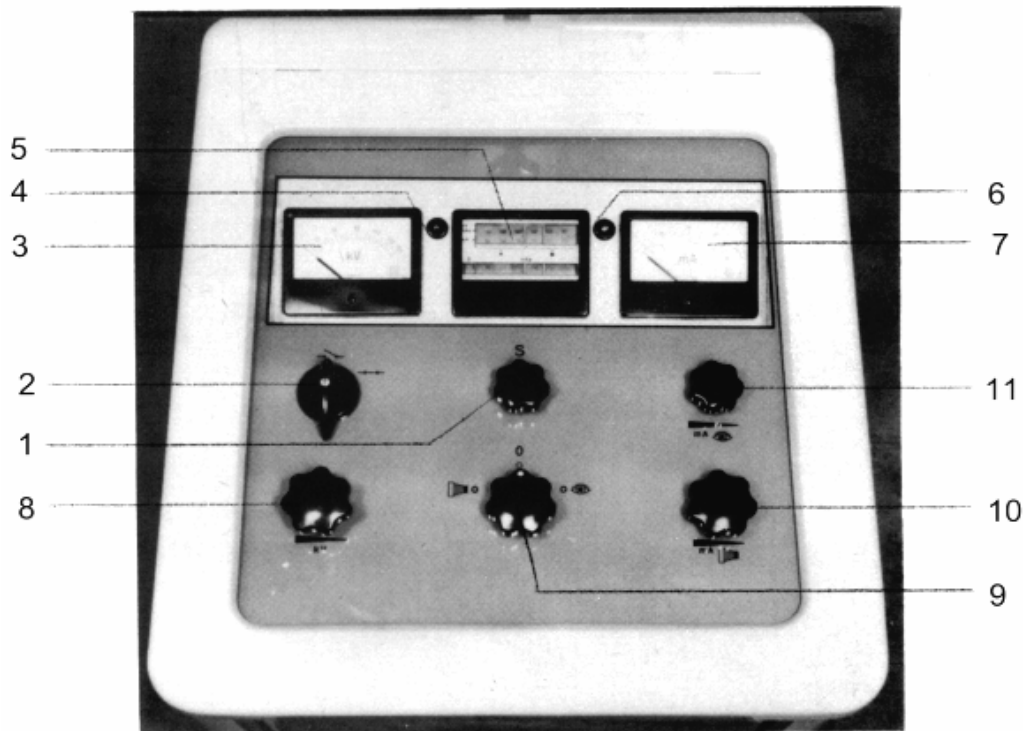

1. Val av exponeringstid.
2. Nätströmbrytare, till- och frånslag av apparaten.
3. KV-instrument (visar vald kV).
4. Indikeringslampa, lyser när apparaten är klar att användas.
5. Visar vald mAs, exponeringstid och mA.
6. Lampa för indikering av överbelastning, till exempel om otillåtna värden valts.
7. Visar mA under exponering.
8. Val av kV.
9. Teknikväljare, **Skall stå till vänster** (exponeringsläge).
10. Val av mA.
11. Används ej.

Kortfattad bruksanvisning:

Apparaten startas genom att (2) ställs i högerläge. KV väljs med (8), mA med (10) och exponeringstid med (1). När lampa (4) lyser grönt är apparaten klar för exponering. Gör klart för exponering med exponeringshandtaget i första läget, exponera med handtaget nedtryckt till andra läget. Apparaten stängs av genom att (2) ställs i vänsterläge.