

UNDERHÅLL AV FRAMKALLARE

Det finns olika typer av framkallare, momenten nedan är avsedda för maskiner med uppsugningspump t ex. CORDELL, FISHER, FUTURA, MI5, PROTEC och VELOPLEX. Man kan aldrig göra rent en framkallningsmaskin för ofta om man gör på rätt vis. Hur ofta man gör rent en framkallare beror bland annat på vattenkvalitet, kemi samt hur ofta och mycket maskinen används. Med anledning av detta är det svårt att ange hur ofta en bestämd maskin ska rengöras. Det är däremot enkelt att avgöra om rengöringen görs för sällan eller felaktigt, detta ser man genom att bildkvaliteten samt funktionen på maskinen försämras.

Nedan kommer rengöringen att kallas för dag- vecko- kvartals- rengöring. Intervallerna är olika för olika applikationer.

DAGLIG RENGÖRING: Torka rent maskinen skal samt inmatningsplåten. Lyft på locket till valsarna, torka ur samt gör en okulärbesiktning.

VECKORENGÖRNING: Följ anvisningarna för "daglig rengöring" samt lyft ur valsarna. Spola valsarna med ljummet vatten och torka med en svamp. Kontrollera valsarnas kondition. Vattenbadet töms och torkas rent för att motverka algbildning.

KVARTALSRENGÖRING: Samma som "veckorengöring" samt att kemin töms ur baden.

Fyll maskinen med vatten och sätt uppsugningsslangarna i vattenbad. Kör maskinen med vatten i cirka 2 minuter. Tappa sedan ur vattnet och ersätt med rengöringsmedel. Se till att utkastad vätska samlas upp i ett kärl med rengöringsvätska där dessutom slangarna till uppsugningspumparna placerats så att rengöringsmedlet cirkulerar i maskinen hela tiden. Töm maskinen på rengöringsmedel och låt den gå med bara vatten i cirka 2 minuter. Tappa ur vattnet och rengör alla bad och valsar noggrant. Fyll på med kemi.

Lämpligt rengöringsmedel är det miljövänliga QPS Cleaner som kan köpas genom SVK Röntgenteknik.

**OBS!! STARTA ALDRIG EN MASKIN UTAN NÅGON VÄTSKA I FRAMKALLAR-
ELLER FIXBADET!!**

Klicka här för att beställa QPS Cleaner